

# ZeolithMED Hautpuder Gebrauchsanweisung

## ZeolithMED HAUTPUDER – ZUR LOKALEN ANWENDUNG AUF DER HAUT BESCHLEUNIGT DIE BLUTSTILLUNG, UNTERSTÜTZT DIE WUNDHEILUNG

Das ZeolithMED Hautpuder ist als nichtinvasives Medizinprodukt ein natürlicher Bioregulator zur äußeren Anwendung auf der Haut.

Das Medizinprodukt ZeolithMED besteht zu 100% aus dem Naturmineral Klinoptilolith-Zeolith. Dieser ist ein kristallines mikroporöses Gestein vulkanischen Ursprungs.

Aufgrund seiner enormen inneren Oberfläche und seiner außergewöhnlichen Eigenschaften zum selektiven Ionenaustausch und Adsorption kann ZeolithMED bei Bedarf in seiner mikroporösen Struktur Exsudate, Schadstoffe, insbesondere die Schwermetalle Quecksilber, Blei und Cadmium, Radionuklide, Histamin sowie Ammonium binden.

Durch diese Eigenschaften kann ZeolithMED Hautpuder z. B. bei verletzter Haut wie ein Schutzschild auf die Wunde aufgebracht, die Blutstillung beschleunigen, das weitere Eindringen von Mikroorganismen vermindern und dadurch die Wundheilung unterstützen.

### ANWENDUNGSBEREICHE ALS WUND-, KÖRPER- UND FUSSPUDER

- zur Detoxikation bei geschädigter Haut, insbesondere bei Schürfwunden, leichten Verbrennungen, Insektenstichen, Reizungen der Haut
- zur schnelleren Blutstillung
- zur Entzündungshemmung und beschleunigter Wundheilung

### WANN SOLLTE ZEOLITH MED® HAUTPUDER NICHT ANGEWENDET WERDEN?

Das Hautpuder darf nicht bei tiefen, die Dermis durchtrennenden Wunden, die nicht nur durch sekundäre Wundheilung geheilt werden können, verwendet werden. Auf jeden Fall ist eine ärztliche Versorgung bei tief klaffenden Wunden angezeigt. Im Zweifelsfall ist vor der Anwendung ein Arzt zu konsultieren.

### DOSIERUNG UND DAUER

Falls von Ihrem Therapeuten nicht anders verordnet, können Sie je nach Bedarf mehrmals täglich ZeolithMED Hautpuder als Wund-, Körper- und Fußpuder auf die entsprechende Körperstelle bzw. im Bereich kleinerer Wunden aufstreuen und wenn nötig, die Wunde mit sterilem Wundverbandmaterial abdecken.

### WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN

Nach der Verwendung von arzneimittelwirksamen Salben, Cremes etc. soll ein Zeitabstand von mindestens 2 Stunden eingehalten werden.

### WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Medizinprodukt ist kein Ersatz für ein Antiallergikum und kann bei tiefen, klaffenden Wunden die ärztliche Versorgung nicht ersetzen!

Im Zweifelsfall ist vor der Anwendung ein Arzt zu konsultieren. Das Medizinprodukt darf nicht inhaliert (eingeatmet) und nicht am Auge angewendet werden. Spülen Sie bei Augenkontakt die Augen ausreichend.

Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken.

### LAGERUNG UND VERWENDBARKEIT

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 6 Jahren auf.

Schließen Sie die Verpackungseinheit immer nach der Verwendung. Lagern Sie das Produkt trocken und bei Zimmertemperatur. Das Verfallsdatum ist auf dem Verpackungsboden aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Überschreiten des Verfallsdatums.

### WEITERE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- als Packung mit Wasser breiartig anrühren, auf betroffene Stellen auftragen, mit Kompressen abdecken und z. B. über Nacht wirken lassen
- bei der Hautpflege eine Messerspitze ZeolithMED Hautpuder in die Handfläche nehmen, mit Hautpflegecreme mischen und wie gewohnt auftragen
- für Masken 1 TL Hautpuder mit etwas Wasser anrühren, dünn auftragen, nach 10 bis 15 Min. abspülen

### INHALTSSTOFFE

Klinoptilolith-Zeolith

### HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Inhalt und Verpackung kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### MEDIZINPRODUKTEHERSTELLER

ZeoBent Handels GmbH

Weißer 2

D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel

Telefon +49 (0) 36742 673937

E-Mail: [info@zeolith-bentonit-versand.de](mailto:info@zeolith-bentonit-versand.de)

Internet: [www.zeolith-bentonit-versand.de](http://www.zeolith-bentonit-versand.de)

<https://www.zeolith-bentonit-versand.de/de/zeolith-hautpuder-40g.html>



Stand: 07/2022